

Reinigingsprocedure voor behandelbanken

** Trek voor het reinigen altijd eerst de stekker uit het stopcontact! **

Reinigen frame

- De metalen delen van het frame mogen gereinigd worden met een zachte droge doek.
- Bij hardnekkig vuil kan eventueel een licht bevochtigde doek gebruikt worden.
- Gebruik hiervoor een PH-neutrale zeepoplossing.

Reinigen ligvlakken en kussens van (kunst)leder

- Gebruik voor het reinigen lauwwarm water en een microvezeldoek.
- Bij hardnekkig vuil ook een PH-neutrale zeepoplossing gebruiken.
- Verwijder de zeepresten met een vochtige doek.
- Gebruik in GEEN GEVAL detergenten, oplosmiddelen (alcohol), agressieve zepen en bleek- of schuurmiddelen. Deze producten kunnen het kunstleder aantasten en de levensduur ervan verkorten!
- Bloedvlekken moeten onmiddellijk verwijderd worden met koud water.
- Massageolie onmiddellijk verwijderen met PH-neutrale zeepoplossing.
- Gebruik geen onderhoudsmiddelen voor leder waarin olie of vet is verwerkt.
- Babyshampoo is uitermate geschikt als reinigingsmiddel.
- De bekleding en het gezichtskussen zijn niet geschikt voor desinfectie d.m.v. warmte.

Desinfecteren ligvlakken

- Opgelet! Eerst reinigen en daarna pas desinfecteren. Voor het desinfecteren moeten olie en vetresten van het oppervlak verwijderd worden met PH-neutrale zeep.
- Controleer of het desinfectiemiddel geschikt is voor het te desinfecteren oppervlak. Alcohol kan sommige oppervlakten aantasten! Gebruik slechts één desinfectiemiddel en houd de concentraties zoals aangegeven op de verpakking aan. Het eenvoudigst en meest praktisch is om een alcoholvrij desinfectiedoekje te gebruiken. Sprays hebben als nadeel dat je de deeltjes kunt inademen.
- Desinfecteer niet d.m.v. verhitting.